



La lanceta de talón de acción de barrido de **NeatNick** produce de forma sencilla un buen flujo de sangre, reduce el rechazo y es menos dolorosa.



Lo que **la gente dice de NeatNick:**

"Me ha gustado mucho la hoja curvada, no siento que tenga que presionar para evitar el 'salto'. ¡Me ha encantado!"

"El bebé no se ha despertado y he obtenido bastante sangre para el laboratorio".

"¡Buen flujo de sangre!. Sin esfuerzo, el bebé ni siquiera lloró".

"Un corte limpio, sin borde".

"Nuestra tasa de recogida de PKU se ha reducido de manera significativa".

COMENTARIOS ESCRITOS RECIBIDOS EN ENSAYOS CLÍNICOS.

NeatNick: lanceta rápida de talón a un precio razonable

- La mayor velocidad de la lanceta se traduce en menos dolor para los neonatos.
- Disparo suave - no "salta".
- Profundidad controlable, comparable con otras marcas.
- Alegres colores tropicales para localizarlos fácilmente.
- Reduce las tasas de rechazo en el neonato y el número de muestras hemolizadas.

(estudios independientes, mayo de 2009, en archivo.)



Prematuro Lima Verde


Para bebés con un peso inferior a 1800 - 2000 gramos (4 - 5 lbs)

Nacidos a Término Naranja Mango

Para bebés con un peso superior a 1800 - 2000 gramos (4 - 5 lbs)

Diseñada para la precisión

La hoja de barrido automático de NeatNick logra una profundidad de incisión controlada más segura que la que se considera en la literatura médica como aceptable para neonatos prematuros y normales.¹⁻³ Su profundidad controlada es equiparable a otras lancetas de talón automáticas,⁴ pero se ha diseñado para reducir al mínimo el dolor del neonato con un corte rápido y preciso.

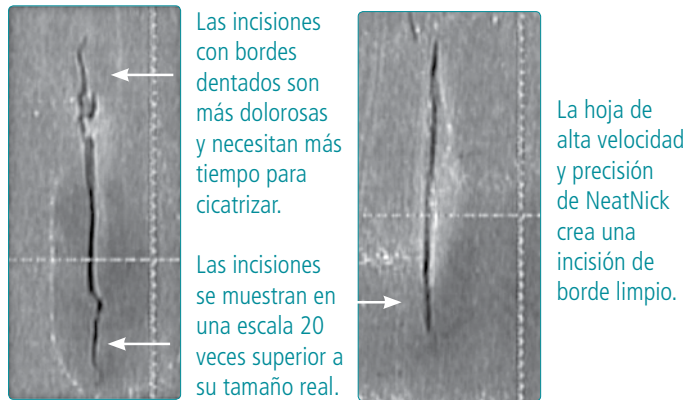

Las incisiones con bordes dentados son más dolorosas y necesitan más tiempo para cicatrizar.

Las incisiones se muestran en una escala 20 veces superior a su tamaño real.

La hoja de alta velocidad y precisión de NeatNick crea una incisión de borde limpio.

1. Blumenfeld, et al. 1979. Recommended site and depth of newborn heel skin punctures based on anatomical measurement and histopathology. Lancet I;230-233.
2. Jain, et al. 1999. Ultrasound study of heel to calcaneum depth in neonates. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. May, 80(3):F243-5.
3. Reiner, et al. 1990. Optimal sites and depths for skin puncture of infants and children as assessed from anatomical measurements. Clin Chem. Mar, 36(3):547-9.
4. Datos en el archivo.

Buen flujo de sangre y obtención de mejores muestras de laboratorio (instrucciones)



1. Tire del anillo de protección de la lanceta interna estéril - No retuerza. (observe el sentido de la hoja).
2. Coloque contra el talón del bebé.
 - El cuerpo texturado asegura una colocación segura en el talón del bebé.
 - El borde afilado y la flecha sirven de guía para la colocación exacta.
3. Presione el disparador
 - Disparo suave - no "salta".
 - La lanceta se retrae y se cierra de forma permanente para garantizar la seguridad después de su uso.

NeatNick: lanceta rápida de talón menos dolorosa

La rápida hoja de NeatNick crea instantáneamente una incisión que es menos dolorosa para el recién nacido. La hoja quirúrgica de gran precisión crea una incisión precisa y de bordes limpios en el lecho capilar, a una profundidad equiparable a la de otras lancetas de barrido. Con NeatNick, puede estar seguro de realizar extracciones de sangre rápidas y abundantes sin tener que apretar en exceso, reduciendo el dolor. Obtendrá mejores resultados en menos tiempo y con menos dolor. Y todo ello a un precio francamente razonable.

Información de pedido

El uso conjunto de NeatNick y TootSweet ofrece una mayor comodidad tanto a su bebé como a su médico. NeatNick se presenta en dos tamaños y colores: Lima Verde/Prematuro y Naranja Mango/Nacidos a Término. Para probar el producto o para cualquier tipo de duda, por favor, póngase en contacto con el servicio al cliente de Natus en el 1-800-303-0306.

Lanceta de talón de acción de barrido NeatNick

| Artículo | Descripción | Cantidad |
|----------|---|--------------|
| 1030083 | Para bebés con un peso inferior a 1800 - 2000 gramos Tamaño Prematuro: Lima Verde | 100 por caja |
| 1030085 | Para bebés con un peso superior a 1800 - 2000 gramos Tamaño Nacidos a Término: Naranja Mango | 100 por caja |

Especificaciones del producto

NeatNick es un "objeto cortante" desechable, estéril de un sólo uso utilizado para realizar una incisión en el talón de un bebé para la obtención de una muestra de sangre. **Las lancetas de talón NeatNick son libres de DEHP, libre de BPA, y no se fabrican con látex de caucho natural.** Consulte las instrucciones de uso.

| | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Tamaño Nacidos a Término | Longitud 2,5 mm-3,0 mm | Profundidad 1,0 mm-1,25 mm |
| Tamaño Prematuro | Longitud 1,75 mm-2,25 mm | Profundidad 0,85 mm-1,0 mm |

Solución TootSweet de sacarosa (24 %)

| Artículo | Descripción | Cantidad |
|--------------|---|-------------|
| 1040029-100 | Viales con punta giratoria: 0,5 ml cada uno | Caja de 100 |
| 10400212-100 | Viales con punta giratoria: 0,5 ml cada uno envasados individualmente | Caja de 100 |
| 1040027-100 | Viales con punta giratoria: 1ml cada uno | Caja de 100 |
| 10400213-100 | Viales con punta giratoria: 1 ml cada uno envasados individualmente | Caja de 100 |
| 1040028-100 | Viales con punta giratoria: 2 ml cada uno | Caja de 100 |
| 10400214-100 | Viales con punta giratoria: 2 ml cada uno envasados individualmente | Caja de 100 |

Para leer las instrucciones del producto TootSweet, consulte la ficha técnica del producto o visite nuestro sitio web en www.natus.com